

Postup testování (LEPU test):

- A) Před testováním si testovaný vydezinfikuje ruce
- B) Dohlížející osoba rozdá žákům testovací sady a provede poučení (při prvním testování a v případě potřeby).
- C) Testovaný odloží respirátor a provede samoodběr (celou hlavičku výtěrové tyčinky zasune do nosní dírky, 5x jemně otočí a totéž provede i u druhé nosní dírky, po dokončení si nasadí respirátor)
- D) Testovaný otevře vyhodnocovací kartu, vsune výtěrovou tyčinku do označených otvorů – z otvoru B do otvoru A, odstraní lepící kroužek.
- E) Dohlížející osoba nakape na testovaný vzorek 6 kapek přiloženého roztoku.
- F) Testovaný otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
- G) Dohlížející osoba spustí odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
- H) Dohlížející osoba zkontroluje výsledky testů a u každé testované osoby provede písemný záznam výsledku testování.
- I) Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhodí, chyba bude zaznamenána a testovaný musí vykonat nový test.